

Systeme d'aide à l'audition

IR

infrarouge



Solutions
pour les salles
de spectacles
et de cinéma



Audition Québec
mieux se comprendre

auditionquebec.org

COMMENT UTILISER LE SYSTÈME IR?

(infrarouge)



Ce système est composé d'un **émetteur** et d'un **récepteur sans fil**. La personne malentendante porte le récepteur fourni par l'établissement. Il existe plusieurs options de port pour ce système.

SANS PROTHÈSE AUDITIVE

(avec des écouteurs)

Branchez directement les écouteurs dans le récepteur infrarouge qui vous sera remis au service à la clientèle ou à la billetterie.



AVEC PROTHÈSE AUDITIVE

(avec des écouteurs)

Branchez directement les écouteurs dans le récepteur infrarouge qui vous sera remis au service à la clientèle ou à la billetterie.

Mettez les écouteurs vis-à-vis des microphones des prothèses auditives.



AVEC IMPLANT COCHLÉAIRE

Branchez directement les écouteurs dans le récepteur infrarouge qui vous sera remis au service à la clientèle ou à la billetterie.


Mettez les écouteurs vis-à-vis du microphone de l'implant (lorsque le placement de celui-ci le permet).



AVEC COLLIER À BOUCLE MAGNÉTIQUE

Le collier à boucle magnétique ou la boucle d'induction ne sont pas une solution de remplacement au port des écouteurs.

Le collier se branche dans le récepteur infrarouge. Il utilise les appareils ou les implants cochléaires comme écouteurs et transmet le signal auditif via un champ magnétique. Ce signal sera capté et amplifié par les prothèses auditives et/ou par les implants cochléaires au programme T / téléphone ou boucle d'induction.

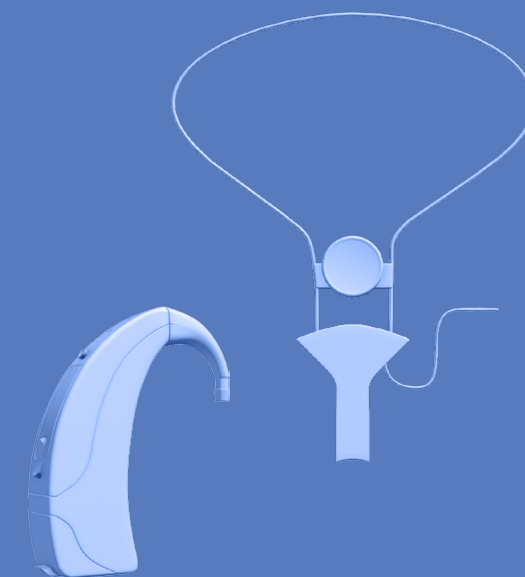

OÙ TROUVER CE SYSTÈME?

À votre arrivée dans une salle de spectacle ou de cinéma, présentez-vous au comptoir du **service à la clientèle** ou à la **billetterie** afin de demander quel système d'écoute pour personne malentendante est disponible.

S'il s'agit d'un système infrarouge (IR), **on vous fournira le récepteur requis** pour l'utilisation.

Pour plus d'information, consultez notre **Répertoire des salles équipées d'un système d'aide à l'audition**

que vous retrouverez sur notre site :

auditionquebec.org

et que vous pouvez commander à notre boutique.

Projet financé par

Office des personnes
handicapées

Québec



AUDITION QUÉBEC est un organisme provincial **à but non lucratif** qui a pour mission de **prévenir** les problèmes d'audition et de **favoriser** l'intégration optimale à la société et l'autonomie des personnes atteintes de tels problèmes.



Audition Québec
mieux se comprendre

514-278-9633

1951, boul. De Maisonneuve Est
Bureau 001
Montréal (Québec) H2K 2C9

auditionquebec.org